

小動物用電気バリカン SN-628-2100・2200 替え刃メンテナンス手順書

このバリカンは軽量で使いやすい反面、モーターのトルクが弱いため、替え刃に毛が少しでも目詰まりを起こすと、スイッチを入れても止まってしまうことがあります。

その際は下記手順書に従って、メンテナンスを行ってください。

メンテナンスを行っても替え刃の動きが鈍い場合は、充電容量が少ない可能性があるため、充電を行ってください。

①替え刃を本体から外します。

本体は充電を行ってください。




②ブラシで毛を取り除きます。



③付属のオイルを塗布します。



④刃先を左右に動かし、オイルを馴染ませます。

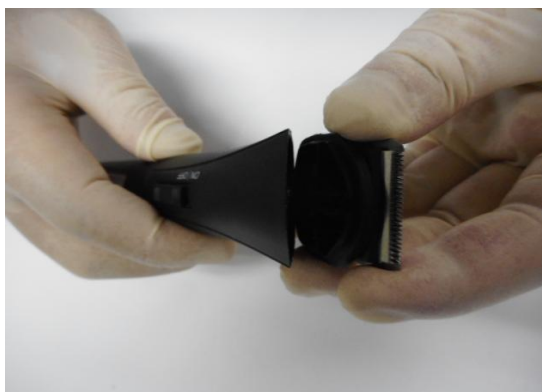

⑤替え刃を本体に組み込みます。

スイッチを入れて、動きを確認します。
動きが鈍い場合は、充電容量が少ない可能性があるため、さらに充電を行ってください。

それでも替え刃が動かない場合は、修理が必要となります。